


運動負荷血圧計タンゴ M2 には、オシロメトリック血圧測定を行える OSC モードが搭載されています。


以下に、OSC モードへの切り替え方法をご説明いたします。

①画面右のパネルキーの DKA/OSC ボタンを押す

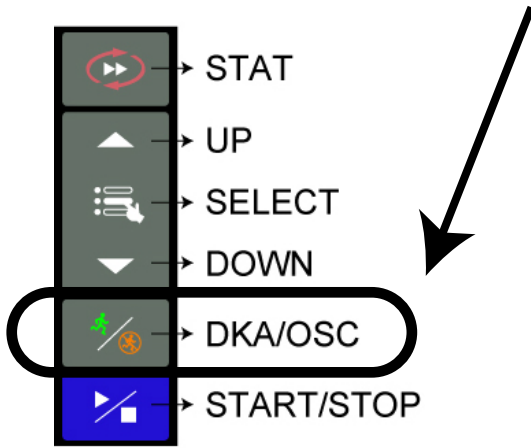

Tango M2 のパネルキー

②画面左下のアイコンが黄色の「OSC MODE」に切り替れば準備完了

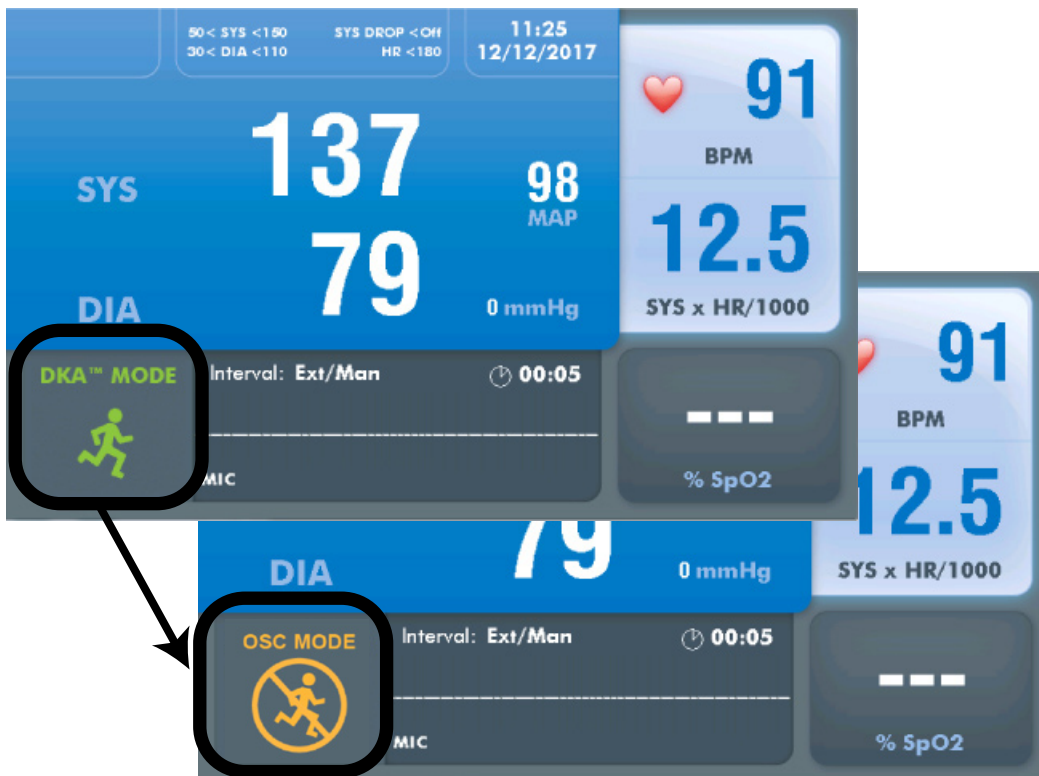

- OSC モードは振動、体動などに弱く、運動中の血圧測定には利用できません。
- 運動中の血圧測定には、必ず DKA モードをご利用ください。
- タngo M2 の電源を入れた時は、DKA モードで立ち上がります。
- OSC モードで測定する場合は、(血圧測定において) 心電信号は不要です。
- DKA/OSC ボタンを押した際に、画面に確認ウィンドウが表示されます。画面の指示に従って、選択を行ってください。